

RedEyeヘモグロビン測定器の使い方

便の検査

-  充電ホルダーから本体を取り出します
-  光学検査用フィルターを1枚取り出します
測定器のフィルタークリップを押し開け、
先端の黒い探針にフィルターを取り付けて、
クリップで固定します
-  電源ボタンを3秒長押しすると
オンになります
-  便器の水にフィルターを取り付けた探針を
約5cm入れ
-  センサーボタンを短く押します
先端の黒い探針がセンサーです
水中に約10～15秒入れます
-  突起部分をスライドさせてフィルターを
外してください
(フィルターは生物分解されますので便器に流せます)
-  探針を約3～5秒流水で洗い、
ペーパータオルで拭いて
-  充電ホルダーに戻してください

尿の検査

-  充電ホルダーから本体を取り出します
-  電源ボタンを3秒長押しすると
オンになります
-  オンになったら、便器の水に探針を入れます
-  センサーボタンを短く押します
先端の黒い探針がセンサーです
水中に約10～15秒入れます
-  探針を約3～5秒流水で洗い、
ペーパータオルで拭いて
-  充電ホルダーに戻してください