

AcidEye 尿液尿酸分析器 使用説明書

AcidEye 1



目次

使用前の注意	. 1
内容物	. 2
規格	. 2
電源とバッテリー	. 2
使い方	. 2
メンテナンス方法	. 3
尿酸濃度の測定数値範囲結果の表示と説明	
バッテリーの説明	

使用前の注意

- 本製品は UV(紫外線)ライトを使用して測定を行います。作動中は光源を直視しないでください。不快感がある場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
- 本製品は光学機器です。使用時は適切に取り扱ってください。ぶつけますと、ガラスなど内部の光学部品が破損します。破損した場合は、必ずメーカーまたは販売店に送って修理してください。
- 本製品の保証期間は1年間です。

AcidEye について

本製品は尿液尿酸分析器です。尿液中の尿酸含有量を測定して段階分けします。

内容物

- 尿液尿酸分析器 x1
- 使用説明書 x1
- スタンド(組立部品含む)x1
- 150 ml カップ x2
- 専用充電ケーブル x1

規格

- 型番:AcidEye 1
- 電源:リチウムバッテリー
- サイズ (mm): 200×45×35 (長さ×幅×高さ)
- 重量 (g):172 (フック別)
- 光源:UV LED
- 動作水温:5℃~40℃
- 防水規格:IPX5




電源とバッテリー

- リチウム電池 DC 3.7V、1500mAh。
- 入力電圧 5V/1A以上(または入力電圧 AC100~240V、50/60Hz、出力電圧 5V/1A以上の電源アダプターも使用可能。)一般的なスマートフォンの充電器を代用できます。
- 本製品は USB ケーブル充電です。Micro USB-C ポートを装備しておりますので、付属の専用充電ケーブルで充電してください。

使い方

測定前の注意:

- 尿液採取の前に、付属のカップ(約 150 ml)と同じ大きさの容器を 2 つ用意して
 - (1) 尿液の採取 (10 ml)
 - (2) 尿液を水で希釈した後の混合液(60 ml) に使用してください。
- 尿液と水の割合は 1:5 です。使用する尿液は10 ml を推奨します。
- ▶ 尿液は中間尿を採取してください。

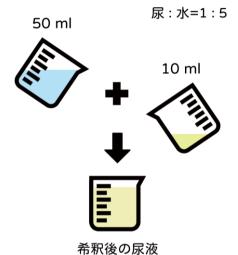

布状俊の尿液 準備ができたら測定します

- 1. 付属のカップで尿液 10 ml を採取して、水道水 50 ml を加えて希釈し、60 ml の混合液にします。
- 2. 電源ボタンを短押しして電源をオンにすると、が表示



されて待機中になります。

3. AcidEye のセンサーヘッドを希釈した尿液に斜めに入れ、センサーボタンを押すと、ディスプレイに と表示されて測定中になり、2 秒後に結果が表示されます。

- 4. ディスプレイは測定結果を 8 秒間表示した後、待機画面に戻り、90 秒後に自動で電源がオフになります。
- 5. 測定終了後、AcidEye のセンサーヘッドを約 10 秒水道の流水で洗浄します。その後、ティッシュペーパーで表面の水分を拭き取り、スタンドに戻して乾かしてください(センサーヘッドは防水・防汚コーティングを施しています)。

メンテナンス方法

3

3 カ月に 1 回お手入れすることをおすすめします。頻繁にお使いになる方は、1 カ月に 1 回を目安にお手入れしてください。

ティースプーン 1 杯(約 4g)の粉末クエン酸を 50ml の水に加え、付属の計量カップの中で 3 分間浸します。その後、流水で探針を洗浄してください。

マークの説明

尿酸濃度の測定数値範囲結果の表示と説明



正常



軽度の異常



中度の異常



重度の異常

< 説明 >

上記の尿酸濃度の正常範囲(<50mg/dL)とは、24 時間の総排尿量を 1,500 ml として、尿酸含有量が 750mg を超えない場合を正常とし、これを基に換算して<50 mg/dL を正常な尿酸濃度としています。

バッテリーの説明



フル充電/待機状態



測定中



電池残量不足



充電中





ご使用前に本使用説明書をよくお読みください。

本使用説明書の著作権は瑞愛生医股份有限公司に帰属します。

本使用説明書に掲載されている画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。 製品に変更がある場合、別途通知いたしませんのでご了承ください。

弊社は本使用説明書の解釈と修正の権利を有します。本使用説明書の内容および規約に対して不明点や異議がある場合、あるいは本製品を使用中に技術的な問題が発生した場合は、

以下までご連絡ください。

カスタマーサービス:+886-3-5750701 Eメール:service@redeyebmi.com

本社:台湾新竹市東区慈雲路 118 号 11F-2 公式ウェブサイト:https://redeyebmi.com